

Ritirare la provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci presso il nostro laboratorio.

Il numero di campioni da raccogliere può variare da 1 a 3 secondo prescrizione medica.

Se la richiesta è su più campioni, la raccolta va effettuata in giorni diversi.

PROCEDERE ALLA RACCOLTA SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

1. Svitare il tappo celeste ed estrarre dalla provetta il bastoncino, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto.
2. Inserire il bastoncino in tre punti differenti delle feci alcune volte in senso verticale e orizzontale. E' sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
3. Reinserire il bastoncino nel flacone, avvitare accuratamente ed agitare per sospendere il campione nel liquido presente.

PRECAUZIONI:

- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci.
- Evitare di contaminare le feci con le urine o con l'acqua del water.
- Non raccogliere il campione nei tre giorni precedenti o seguenti:
 - il ciclo mestruale
 - il sanguinamento dovuto ad emorroidi o ragadi
 - l'assunzione di medicinali per via rettale.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino o di perdita del liquido in essa contenuto.

CONSERVAZIONE:

Il campione può essere conservato a + 2/8 °C (frigorifero) e consegnato entro 3-4 giorni dalla raccolta.